



Plastic Deci-Protect

| ART NO | NAVN | FORPAKNING |
|--------|----------------------|--|
| 65 034 | Plastic Deci-Protect | Eske med 10 individuelt pakkede servietter |

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Plastic Deci-Protect desinfiserer og holder plastoverflatene på arbeidsplassen hygieniske og fri for smittebærende mikroorganismer. Våtservietten er spesielt utviklet for desinfeksjon av overflater og langtidsvirkende antibakteriell beskyttelse. Etter at væsken har tørket, dannes en tynn antibakteriell hinne som reduserer risikoen for smittespredning fra overflaten. Denne effekten varer i 10 dager.

BRUKSANVISNING

Rengjør overflaten uten å etterskylle. Veldig skitne overflater rengjøres ytterligere en gang med en ny serviett. Tørk deretter tørt med Vidamic Cleaner Tissue. Vent 5 minutter før du bruker Vidamic Plastic Deci-Protect. Skylles ikke bort. La virke i 5-15 minutter for full effekt. Sørg for at hele overflaten behandles, dette for å sikre full effekt av desinfeksjonen. Blandes ikke med andre rengjøringsmidler eller tilsetningsstoffer.

MILJØINFORMASJON

Holder behandlede overflater hygieniske og fri for mikrobiell vekst mellom hver rengjøring.

Servietten inneholder antibakterielle midler og skal derfor ikke skylles ned i avløpet. Brukte servietter kastes med brennbart avfall for energiutvinning. Posen sorteres som papiremballasje.

MILJØFORDELER

Den antimikrobielle effekten er testet og godkjent iht. ASTM E 2180 internasjonal standard for å bestemme aktiviteten til antimikrobielle midler i polymermaterialer eller hydrofobe materialer.

INNEHOLDER

Benzalkoniumklorid, natriumpyriron, polymeren, parfyme.

TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Vidamic Plastic Deci-Protect er aktiv mot følgende organismer: bakterier, sopp, virus (hepatitt B og C, HIV, influensa H5N1 og H1N1, rotavirus (gir omgangssyke og diaré) og adenovirus (infeksjoner bl.a. i luftveiene). pH: 5-7
Holdbarhet: Flere år i uåpnet forpakning.

SIKKERHETSINFORMASJON

Kan forårsake irritasjon i kontakt med øynene. Skyll åpne øyne lenge med store mengder vann. Kontakt lege om plagene vedvarer. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.