

SHOULDER PAD & REACTIVATOR



ART NO	NIMI
65 140	Shoulder Pad
65 121	Reactivator

TUOTEKUVAUS

Vidamic Shoulder Pad on ergonomisesti muotoiltu ja kuviosuojattu lämpötyyny niskan ja hartioiden lämpökäsittelyyn. Lämpökäsittely on tunnustettu käsittelymetodi jäsenten ja lihasten jäykkyyden ennaltaehkäisyyn. Käsittelyä voidaan myös käyttää rasitusvammojen, kuntoutuksen ja kivunlievityksen helpottamiseksi. Vidamic Shoulder Pad auttaa vähentämään työtapaturmia ja stressiä. Lämpökäsittely antaa miellyttävän ja tehokkaan stimuloinnin lihaksistolle tunnin ajaksi. Lämpötyyny ladataan höyryn avulla ja aktivoidaan yksinkertaisesti yhdellä napinpainalluksella. Aktivointi voi tapahtua myöhemmin itse lämmittämisen jälkeen.

HUOM! Tyyny on erittäin lämmin heti keittämisen jälkeen. Jotta suolaliuos tyynyssä aktivoituisi, pitää sen jäähtyä. Älä laita sitä suoraan iholle, vaan suoja pyyheliinalla tai vastaavalla. Ole tarkka keittimen puhdistuksen kanssa ja vaihda vesi säännöllisesti. Vinkki-tiputa 2 rkl etikkaa veteen ja anna seistä yön yli. Älä koskaan käännä ajastinta taksepäin, vaan anna sen mennä loppuun itsestään.

TÄRKEÄÄ!

1. Kun tyynyä on käytetty, uudelleenaktivoi se mahdollisimman nopeasti.
2. Huolehdi että keittimessä on aina tarpeeksi vettä, ylärajaan asti.
3. Älä koskaan paina tyynyn metallinappia kun se on vielä lämmin.
4. Käytä lämpötyynyä säännöllisesti ennaltaehkäisevästi, tai tarvittaessa.

TEKNINEN/KEMIKAALI-INFO

Täyttää EU:n direktiivin sähkölaitteille EN55014:1993 ja EN50082-1:1992 ja on CE-merkitty. Täyttää EU:n vaatimukset RoHS direktiivin raskasmetallien rajoituksista. Vidamic täyttää tuotevastuun sähkölaitteista yhteistyössä Elkreten kanssa. Hae lisää tietoa www.elkreten.se.