

SHOULDER PAD & REACTIVATOR



ART NO	BENÄMNING
65 140	Shoulder Pad
65 121	Reactivator

PRODUKTBESKRIVNING

Vidamic Shoulder Pad är en ergonomiskt utformad och mönsterskyddad värmekudde för värmebehandling av nacke och axlar. Värmebehandlingen är en erkänd behandlingsmetod för förebyggande av stelhet i leder och muskler. Behandlingen kan också användas för lindring av belastningsskador, rehabilitering, smärtlindring samt uppmjukning. Vidamic Shoulder Pad verkar avstressande och förebygger arbetsskador. Värmebehandlingen ger en behaglig och effektiv stimulering av muskulaturen under en timmes tid. Värmekudden laddas med hjälp av ånga och aktiveras enkelt av användaren med en enkel knapptryckning. Aktivering kan ske långt efter själva laddningen.

OBS! Kudden blir mycket varm direkt efter kokningen. För att saltlösningen i kudden ska aktiveras, måste den svalna. Lägg den inte direkt på huden, utan skydda med en handduk eller liknande. Var noga med att rengöra kokaren ofta och byt vatten regelbundet. Tips - droppa 2 msk ättika i vattnet och låt det stå under natten. Vrid aldrig tillbaka timern utan låt den gå tillbaka av sig själv.

VIKTIGT!

1. När värmekudden är använd, reaktivera den igen så fort som möjligt.
2. Se till att vattnet i behållaren alltid når upp till markeringen.
3. Tryck aldrig på metallknappen i kudden medan den ännu är varm.
4. Använd värmekudden regelbundet i förebyggande syfte, eller vid behov.

TEKNISK/KEMISK INFORMATION

Uppfyller kraven i EU's direktiv för elektriska apparater EN55014:1993 och EN 50082-1:1992 och är CE-märkt. Uppfyller kraven i EU:s RoHS direktiv om begränsning av tungmetaller. Vidamic uppfyller producentansvaret för elartiklar genom medlemskap i Elkretsen. Se vidare www.elkretsen.se.