

# SHOULDER PAD & REACTIVATOR



ART NO	NAME
65140	Shoulder Pad
65121	Reactivator

## PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Shoulder Pad er en ergonomisk udformet og varemærkebeskyttet varmpude til varmebehandling af nakke og skuldre. Varmebehandlingen er en anerkendt behandlingsmetode til forebyggelse af stivhed i led og muskler. Behandlingen kan også anvendes til lindring af belastningsskader, rehabilitering, smertelindring samt blødgøring. Vidamic Shoulder Pad virker afstressende og forebygger arbejdsskader.

Varmebehandlingen giver en behagelig og effektiv stimulering af muskulaturen i løbet af en times tid. Varmepuden oplades ved hjælp af damp og aktiveres nemt af brugeren med et enkelt tryk på knappen. Aktivering kan ske lang tid efter selve opladningen.

OBS! Pudens bliver meget varm lige efter reaktivering. For at saltopløsningen i pudens kan aktiveres, skal den nedkøles. Vær omhyggelig med at rengøre kogerens ofte og udskift vandet regelmæssigt. Tips - put 2 spiseskefulde eddike i vandet og lad det stå henover natten. Vrid aldrig timeren tilbage, lad den gå tilbage af sig selv.

## VIGTIGT!

1. Når varmpuden er anvendt, reaktiver den igen så hurtigt som muligt.
2. Sørg for at vandet i beholderen altid når op til markeringen.
3. Tryk aldrig på metalknappen i pudens imens den stadigvæk er varm.
4. Anvend varmpuden regelmæssigt til forebyggelse, eller efter behov.

## TEKNISK/KEMISK INFORMATION

Opfylder kravet i EU's direktiv for elektriske apparater EN55014:1993 og EN 50082-1:1992 og er CE-mærket. Opfylder kravet i EU's RoHS direktiv om begrænsning af tungmetaller.

Vidamic opfylder producentansvaret for elartikler gennem medlemskab i Elkretsen. Se mere på [www.elkretsen.se](http://www.elkretsen.se).