

## BACK WARMER BELT, PADS



ART NO	NAME	APPEARANCE	SIZE	PACKAGING
65 194	Back Warmer Belt sort		117 cm	stk.
65 195	Warmer Pads	blå	15 x 20 cm	stk.
65 121	Reactivator			stk.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Rygsmertter kan være et stort problem, både for den enkelte medarbejder med smerter, og for virksomheden grundet høje omkostninger ifm. sygefravær.

Vidamic Back Warmer Belt er et smidigt rygbælte med god komfort og pasform, der giver god bevægelighed. Det har desuden en lomme til varmepude, som varmer den nederste del af ryggen.

Back Warmer Belt kan maskinvaskes ved 30 °C og skal herefter dryptørre.

### WARMER PAD

Ergonomisk udformet varmepude til Back Warmer Belt. Varmen virker afstressende og kan forebygge samt lindre ved belastningsskader og smerter.

Varmeterapi giver lindring af smerter og stivhed i muskler og led. Tag emballagen af, tryk på metalknappen som sidder inden i Warmer Pad, der opstår en naturlig kemisk proces som gør at Warmer Pad bliver varm.

### VIGTIGT !

1. Når varmepuden er brugt, reaktiver den så igen så

hurtigt som muligt.

2. Sørg for at vandet i beholderen altid når op til markeringen.

3. Tryk aldrig på metalknappen i puden mens den endnu er varm.

4. Anvend varmepuden jævnlgt som forebyggende formål eller efter behov.